

# Hemoclip

1

Placera tummen i ringen och pekfinger samt långfinger runt greppet. Stäng genom att föra greppet mot tummen. Du får taktill feedback vid stängt läge genom att det knäpper till i handtaget. Testa clipset genom att öppna och stänga, samt rotera.

2

Stäng clipset och mata in det i arbetskanalen. Positionera endoskopet. Mata ut clipset så att minst hela metallkopplingen blir synlig. Öppna nu clipset. **Första läget från stängt är Hemoclip 11 mm. Maximalt öppet är det 16 mm.** Roter vid behov till optimalt läge genom att rotera hela handtaget. Clipset kan stängas och öppnas obegränsat antal gånger innan det avfyras.

3

När optimal position uppnåtts och clipset ska avfyras, dra då med en bestämd rörelse greppet för pekfinger och långfinger hela vägen till ringen som tummen greppar. **När greppet når ringen är clipset avfyrat och greppet är i ett låst läge.** Inga fler rörelser krävs. Inspektera området och dra ut katetern. Rör ej greppet under tiden clipset matas ut ur endoskopets arbetskanal.



## Produktspecifikation Hemoclip 11+

Artikelnr	Kateterlängd	Arbetskanal	Gap/öppning	Antal/förp
10-711877	230mm	2,8mm	11 och 16 mm	10



## Hemoclip 11+

Styrkan hos 11 mm. Räckvidden hos 16 mm.